



#### 【禁忌症】

目前尚未发现

#### 【注意事项】

- 1、必须在充分止血条件下使用，否则会稀释已注入的透明质酸钠凝胶，从而降低防粘连效果。
- 2、本品为一次性使用；内包装破损，禁止使用。
- 3、本品为无菌，应严格无菌操作。

#### 【型号、规格】

质量浓度10mg/ml，每支装量：2ml、2.5ml、3ml。

#### 【储存】

避光、密封，25℃以下，避免冻结。

#### 【运输】

不得日晒、雨淋、挤压，运输过程中小心轻放。

#### 【包装】

预灌封注射器包装。封装于单包装容器（透气纸袋或塑料泡罩）内，1支/盒。

#### 【生产日期】

见标签

#### 【使用期限】

36个月

【医疗器械注册证编号】国械注准20153140607

【产品技术要求编号】国械注准20153140607

【生产许可证编号】沪食药监械生产许20000135号

#### 【注册人/生产企业】

名称：上海昊海生物科技股份有限公司

住所：上海市松江工业区洞泾路5号

生产地址：上海市松江工业区洞泾路5号

邮政编码：201613

电话号码：021-62807240

传真号码：021-62805863

网址：<http://www.3healthcare.com>

售后服务单位：上海昊海生物科技股份有限公司

售后服务电话：021-62807240

修订日期：2020年6月10日



# 医用透明质酸钠凝胶使用说明书

YIYONG TOUMING ZHISUANNA NINGJIAO

#### 【产品名称】

医用透明质酸钠凝胶


#### 【物理性状】

本品为无色透明的粘稠液体，无任何肉眼可见的异物。

#### 【有效成分】

本品有效成分为透明质酸钠。

结构式：

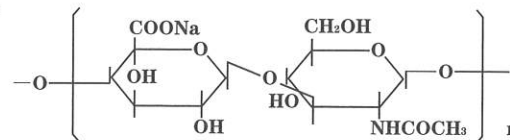

分子式： $(C_{14}H_{20}NO_{11}Na)_n$

#### 【结构及组成】

本品为无色透明的粘稠液体，主要成分为透明质酸钠，透明质酸钠原料从鸡冠中提取。透明质酸钠是由(1-β-4)D葡糖醛酸(1-β-3)N-乙酰基-D氨基葡萄糖的双糖重复单位组成的粘多糖。透明质酸钠质量浓度10mg/ml。该产品采用终产品湿热灭菌达到无菌，一次性使用。

#### 【作用机理与功能】

本品为无色透明的粘稠状液体。用于外科手术时，因其独有的粘弹性，在体内具有高度的渗透缓冲效应，保护受损组织，减少粘连形成。

#### 【平均分子量】

特性黏数应不小于1500 cm<sup>3</sup>/g(换算成黏均分子量应不小于840 000道尔顿)；重均分子量应不小于1.00 × 10<sup>6</sup>道尔顿。

#### 【适用范围】

本品辅助用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连。

#### 【用法与用量】

- 1、腹腔手术：于手术关腹前涂覆2-8ml，或遵医嘱可酌量增减使用。
- 2、妇产科手术：术后涂布于吻合口周围及易粘连的粗糙面。涂覆2-8ml，或遵医嘱可酌量增减使用。

#### 【不良反应】

目前尚未发现