





使用说明书

- **[主要成份]**: 本品以每毫升含 4mg 几丁糖和 0.5mg 透明质酸钠藉生理平衡液配制而成。几丁糖和透明质酸钠具有润湿和保湿的功能。
- **[作用机理]**: 隐形眼镜润眼液（原名称“润眼液”）是由医用透明质酸钠和医用几丁糖组成的混合物，具有良好的生物相容性、生物可降解性及生物学活性的医用高分子多糖类物质，其作用机理有：
 - 具有湿润感，舒适感；
 - 具有较强的保湿性；
 - 本产品不含防腐剂及抗菌剂，一次性使用，避免开瓶后溶液自身的污染，也避免由此造成眼睛的二次污染。
- **[适应证]**: 用于隐形眼镜配戴前后缓解眼干涩、疲劳。
- **[物理性状]**: 本品为无色、澄明、微粘稠液体。
- **[使用方法]**: 本品为无菌一次性包装，五支连体。使用时先撕下一支，捏住两端，旋开封口，一次性使用，用毕丢弃。每日两次，一次一支或在需要时使用。
- **[注意事项]**: 为防止污染，勿将瓶口触及任何物体表面，一旦打开，用一次后应立即丢弃，勿再用。如果应用时，觉得眼疼，视力改变，眼部持续充血或刺激感，或使用 72 小时后眼部原有症状没有改善或症状加重，则应停止使用并咨询医生。如果溶液变色或变成雾状，则不要用该溶液。远离儿童存放。
- **[提示]**: 本品为经纯化、无毒、无致敏反应的天然聚糖，其主要成分透明质酸钠来源于细菌发酵制备，几丁糖是从对虾壳中提取的，但医生应有使用任何天然生物材料具有潜在过敏性危险的意识。目前尚未发现其它不良反应。
- **[规格]**: 0.4ml/支；1ml/支；3ml/支。
- **[储存、运输条件]**: 阴凉处保存、常温运输。本品不含清凉剂，冷藏后使用感觉更舒适。
- **[生产许可证编号]**: 沪食药监械生产许 20000007 号
- **[医疗器械注册证编号]**: 国食药监械（准）字 2014 第 3221050 号
- **[产品标准号]**: YZB/国 1371-2014
- **[使用期限]**: 两年。
- **[生产日期]**:

包装和标签使用图形、符号的解释:

 批次代码 制造日期（生产日期） 使用期限 经无菌处理技术灭菌 不得二次使用 包装破损切勿使用 制造商（生产企业） 参考使用说明 注意，参考随附文件

注册人/生产企业: 上海其胜生物制剂有限公司

地址: 上海市闵行区吴淞路 1008号

业务联系电话: 021-62201143 传真: 021-62209630 技术服务电话: 021-52234909

E-mail: qish@shqisheng.com 邮编: 201106

售后服务单位: 上海其胜生物制剂有限公司 地址: 上海市闵行区吴淞路 1008号 售后服务电话: 800-820-5613

修订日期: 2015年4月20日